

epotam esthetic

## Metaloterapia facial

### Propiedades conductoras

Los metales, como el aluminio, son conductores de calor. Por lo tanto, pueden ayudar a regular la temperatura de la piel, ofreciendo una sensación refrescante cuando se aplican en frío y favoreciendo la circulación sanguínea cuando se calientan ligeramente.

### Estimulación de la circulación

La naturaleza conductora de los metales puede estimular la circulación sanguínea y linfática, favoreciendo la oxigenación de los tejidos.

### Efectos tonificantes

Las herramientas metálicas pueden tener un efecto tonificante en la piel, mejorando su elasticidad y firmeza.



- Eliminar las líneas de expresión
- Elevar las cejas.
- Rellenar los pómulos.
- Mejorar y eliminar las ojeras.
- Eliminar los pliegues de la sonrisa.
- Reducir la papada.
- Tonificar, reafirmar y rejuvenecer la piel.
- Limpiar las impurezas..



### 1. Preparación:

Comienza limpiando el rostro del cliente con un limpiador suave adecuado para su tipo de piel. Aplica una loción tónica para restablecer el pH de la piel.

### 2. Uso del Champiñón:

El champiñón se utiliza generalmente por sus efectos relajantes y para mejorar la circulación sanguínea. Con movimientos suaves y circulares, comienza a masajear la frente, desplazándote luego hacia las sienes.

Desciende a lo largo de los pómulos y termina en el mentón.

Repite estos movimientos varias veces.

### 3. Uso de la Tabla de Modelado:

Esta herramienta es ideal para esculpir y definir los contornos del rostro.

Coloca la tabla de modelado en la base del mentón y deslízala suavemente hacia las orejas, siguiendo la línea de la mandíbula.

Haz lo mismo comenzando desde la nariz, pasando por debajo de los ojos y llegando hasta las sienes.

Esto ayudará a drenar los fluidos y a reducir las bolsas bajo los ojos.

### 4. Uso del Corte Sueco:

Esta herramienta se utiliza por sus efectos estimulantes y tonificantes.

Comienza por la frente y desplázate en movimientos circulares hasta las sienes.

Continúa sobre las mejillas y termina en la mandíbula y el cuello.

Repite estos movimientos para una buena estimulación de la piel.

### 5. Uso del Pequeño Rodillo de Metal:

Esta herramienta es perfecta para las áreas más pequeñas y sensibles.

Usa el rodillo para aplicar una presión ligera en las zonas alrededor de los ojos y los labios, favoreciendo así la reducción de las líneas finas y mejorando la elasticidad de la piel.

Realiza movimientos de rodado suaves para estimular la microcirculación y la absorción de los productos de cuidado aplicados anteriormente.

### 6. Conclusión:

Una vez que hayas terminado con las tres herramientas, aplica un sérum hidratante o un aceite en el rostro del cliente.

Termina con una crema hidratante y/o un protector solar si el tratamiento se realiza durante el día.